


| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーオフ フロー2 ½ トーオフ 2 ½ | トーオフ 2.0 トーオフ ショート | ブルーロッカー 2 ½ ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|

カーボン製短下肢装具

品名: イブシロン フロー 1/2

■完成用部品認可済 <アラード YPS>

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●●●●○ |
| M-Lの安定性 | ●●○○○ |
| A-Pの安定性 | ●●○○○ |
| 背屈アシスト | ●●○○○ |
| 痙性への対応 | ●●○○○ |
| 近位関節のサポート | ●●○○○ |





フロー



ローヒール




Y字形状になっており、脛骨稜のプレッシャーを分散します。



フットプレートから外側支柱立ち上がり部の厚みを抑えたデザイン。



フットプレートの反り上がりを抑え、靴の中でつま先部のスペースを十分に確保できます。



■解剖学的デザインの脛骨パッドとストラップ
脛骨突起部にかかる圧が均一に分散されるデザインになっております。スムーズで薄い脛骨パッドとストラップにより装具を足に固定します。スポン装着時に摩擦を防ぎ、目立たない素材です。ストラップの取付け向きを変えれば、左右どちらの手でも取扱いが簡単です。

適応

- 軽度の下垂足

特徴

- アラードAFOシリーズの中で最も剛性が低く、柔らかく扱えます。
- フットプレートに柔らかさがあるフロータイプ。前後への適切な可動域があります。
- 下腿前面のクリアランスを保ち、足関節の動きを制限しません。
- Y字形状により脛骨稜への圧迫を防ぎます。
- 踵の差高を低く抑えた構造(7mm)。スニーカーやリハビリシューズ向き。

■サイズ

Item no: 28880 / 左右 / サイズ

| Size | イブシロンフロー 1/2 | | |
|------|--------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | — | — | — |
| S | 230mm | 355mm | 7mm |
| M | 245mm | 365mm | 7mm |
| L | 270mm | 375mm | 7mm |
| XL | 285mm | 385mm | 7mm |

■ 消耗交換品

| | |
|-------|--------------------------------|
| 脛骨パッド | Item no: 28884 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップ | Item no: 28885 / サイズ共通 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーオフ フロー2 1/2 トーオフ 2 1/2 | トーオフ 2.0 トーオフ ショート | ブルーロッカー 2 1/2 ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------|

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●●●○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●○○ |
| A-Pの安定性 | ●●●○○ |
| 背屈アシスト | ●●●○○ |
| 痙性への対応 | ●●●○○ |
| 近位関節のサポート | ●●●○○ |

フロー

ローヒール

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:トーオフ フロー 2 1/2

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 軽度から中程度の下垂足

特徴

- フットプレートに柔らかさがあるフロータイプ。前後への適切な可動域があります。
- 踵の差高を低く抑えた構造(7mm)。スニーカーやリハビリシューズ向き。
- トーオフ2.0と比較し、つま先の反り上がりを抑え、靴の中でつま先部のスペースを十分に確保できます。

■サイズ

Item no: 28960 / 左右 / サイズ

| Size | トーオフ フロー 2 1/2 | | |
|------|----------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | 210mm | 360mm | 7mm |
| S | 230mm | 380mm | 7mm |
| M | 245mm | 405mm | 7mm |
| L | 270mm | 430mm | 7mm |
| XL | 285mm | 450mm | 7mm |

■ 消耗交換品

| | |
|---------------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28750 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28760 / サイズ(本体サイズに従う) |
| Dリング式ストラップセット | Item no: 28761 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●●○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●○○ |
| A-Pの安定性 | ●●●○○ |
| 背屈アシスト | ●●●○○ |
| 痙性への対応 | ●●●○○ |
| 近位関節のサポート | ●●●○○ |

ローヒール

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:トーオフ 2 1/2

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中程度の下垂足

特徴

- 立脚期での支持性と踏み返しを提供します。
- 踵の差高を低く抑えた構造(7mm)。スニーカーやリハビリシューズ向き。
- トーオフ2.0と比較し、つま先の反り上がりを抑え、靴の中でつま先部のスペースを十分に確保できます。

■サイズ

Item no: 28980 / 左右 / サイズ

| Size | トーオフ 2 1/2 | | |
|------|------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | 210mm | 360mm | 7mm |
| S | 230mm | 380mm | 7mm |
| M | 245mm | 405mm | 7mm |
| L | 270mm | 430mm | 7mm |
| XL | 285mm | 450mm | 7mm |

■ 消耗交換品

| | |
|---------------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28750 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28760 / サイズ(本体サイズに従う) |
| Dリング式ストラップセット | Item no: 28761 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーオフ フロー2 ½ トーオフ 2 ½ | トーオフ 2.0 トーオフ ショート | ブルーロッカー 2 ½ ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●●○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●○ |
| A-Pの安定性 | ●●●●○ |
| 背屈アシスト | ●●●●○ |
| 瘦性への対応 | ●●●●○ |
| 近位関節のサポート | ●●●●○ |

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:トーオフ 2.0

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中程度の下垂足

特徴

- 立脚期での支持性と踏み返しを提供します。
- 踵の差高が高く(12-16mm)、ビジネスシューズやドレスシューズ向き。

■サイズ

Item no: 28920 / 左右 / サイズ

| Size | トーオフ 2.0 | | |
|------|------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | 210mm | 360mm | 12mm |
| S | 230mm | 380mm | 12mm |
| M | 245mm | 405mm | 15mm |
| L | 270mm | 430mm | 16mm |
| XL | 285mm | 450mm | 16mm |

■ 消耗交換品

| | |
|---------------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28750 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28760 / サイズ(本体サイズに従う) |
| Dリング式ストラップセット | Item no: 28761 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●●○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●○ |
| A-Pの安定性 | ●●●●○ |
| 背屈アシスト | ●●●●○ |
| 瘦性への対応 | ●●●●○ |
| 近位関節のサポート | ●●●●○ |

ソフトキット

ストラップセット

ショート

ローヒール

カーボン製短下肢装具

品名:トーオフ ショート

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中程度の下垂足

特徴

- 立脚期での支持性と踏み返しを提供します。
- 踵の差高を低く抑えた構造(7mm)。スニーカーやリハビリシューズ向き。
- 構造的な高さを低く抑え、小柄な方でもフィットするショートモデル。

■サイズ

Item no: 28990 / 左右 / サイズ

| Size | トーオフ ショート | | |
|------|------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | - | - | - |
| S | 215mm | 295mm | 7mm |
| M | 235mm | 320mm | 7mm |
| L | 255mm | 340mm | 7mm |
| XL | - | - | - |

■ 消耗交換品

| | |
|----------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28391 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28768 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーオフ フロー2 ½ トーオフ 2 ½ | トーオフ 2.0 トーオフ ショート | ブルーロッカー 2 ½ ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●○○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●● |
| A-Pの安定性 | ●●●●● |
| 背屈アシスト | ●●●●● |
| 瘻性への対応 | ●●●●● |
| 近位関節のサポート | ●●●●● |

ローヒール

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:ブルーロッカー 2 1/2

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中から高程度の下垂足、両側ユーザー、前足部切断

特徴

- アラードAFOシリーズの中で最も剛性が高く、支持性があります。
- 踵の差高を低く抑えた構造(7mm)。スニーカーやリハビリシューズ向き。
- ブルーロッカー2.0と比較し、つま先の反り上がりを抑え、靴の中でつま先部のスペースを十分に確保できます。

■サイズ

Item no: 28970 / 左右 / サイズ

| Size | ブルーロッカー 2 1/2 | | |
|------|---------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | 210mm | 360mm | 7mm |
| S | 230mm | 380mm | 7mm |
| M | 245mm | 405mm | 7mm |
| L | 270mm | 430mm | 7mm |
| XL | 285mm | 450mm | 7mm |

■消耗交換品

| | |
|---------------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28750 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28760 / サイズ(本体サイズに従う) |
| Dリング式ストラップセット | Item no: 28761 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●○○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●● |
| A-Pの安定性 | ●●●●● |
| 背屈アシスト | ●●●●● |
| 瘻性への対応 | ●●●●● |
| 近位関節のサポート | ●●●●● |

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:ブルーロッカー 2.0

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中から高程度の下垂足、両側ユーザー、前足部切断

特徴

- アラードAFOシリーズの中で最も剛性が高く、支持性があります。
- 踵の差高が高く(12-16mm)、ビジネスシューズやドレスシューズ向き。

■サイズ

Item no: 28940 / 左右 / サイズ

| Size | ブルーロッカー 2.0 | | |
|------|-------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | 210mm | 360mm | 12mm |
| S | 230mm | 380mm | 12mm |
| M | 245mm | 405mm | 15mm |
| L | 270mm | 430mm | 16mm |
| XL | 285mm | 450mm | 16mm |

■消耗交換品

| | |
|---------------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28750 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28760 / サイズ(本体サイズに従う) |
| Dリング式ストラップセット | Item no: 28761 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーオフ フロー2 ½ トーオフ 2 ½ | トーオフ 2.0 トーオフ ショート | ブルーロッカー 2 ½ ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●○○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●● |
| A-Pの安定性 | ●●●●● |
| 背屈アシスト | ●●●●● |
| 瘻性への対応 | ●●●●● |
| 近位関節のサポート | ●●●●● |







ショート



ローヒール

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:ブルーロッカー ショート

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中から高程度の下垂足、両側ユーザー、前足部切断

特徴

- アラードAFOシリーズの中で最も剛性が高く、支持性があります。
- 踵の差高を低く抑えた構造(7mm)。スニーカーやリハビリシューズ向き。
- 構造的な高さを低く抑え、小柄な方でもフィットするショートモデル。

■サイズ

Item no: 28995 / 左右 / サイズ


| Size | ブルーロッカー ショート | | |
|------|--------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| XS | — | — | — |
| S | 215mm | 295mm | 7mm |
| M | 235mm | 320mm | 7mm |
| L | 255mm | 340mm | 7mm |
| XL | — | — | — |

■ 消耗交換品

| | |
|----------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28391 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28768 / サイズ(本体サイズに従う) |

前足部切断者への新しいアプローチ


ブルーロッカーを前足部切断者への義足パーツとして用いることが可能です。カーボン素材とその製品形状の特徴を利用することにより多くのメリットを享受できます。

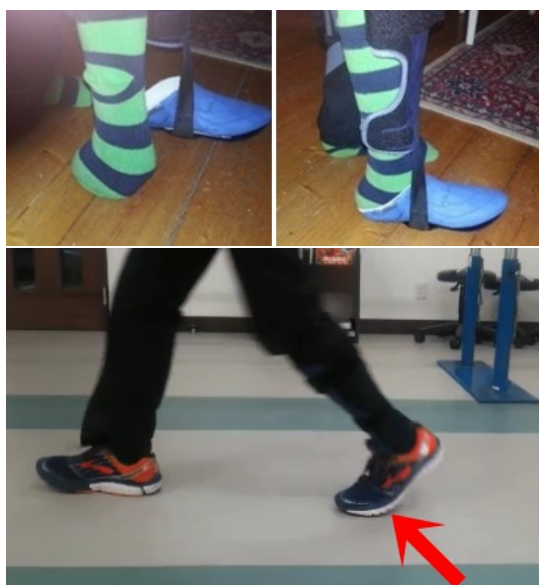

- 推進力の復元
- 歩行スピードの向上
- 断端末での摩擦の軽減

ウィンドラス機構が機能していると、MP関節伸展に伴う足底腱膜の巻き上げにより足部のアーチが緊張し、足部の剛性が高まり推進力が増加します。しかし前足部切断のケースでは、この機能が有効に働かないため、十分な推進力が得られません。また、健常者の足部ではレバーアームの長さで下腿のバランスが保たれているので、摩擦は生じません。しかし、前足部切断のケースでは、レバーアームの長さが短くなり、下腿の力が勝り、断端末部に摩擦が生じ胼胝等の原因になります。

ブルーロッカーを義足として利用すると、フットプレートと脛骨前面のシェルがレバーアームの長さを補完し、反発力を生み出し、十分な推進力を得る事ができます。また、つま先まで長さがあるフットプレートにより、圧力がフットプレートの遠位にかかり、断端末部での摩擦を軽減させます。

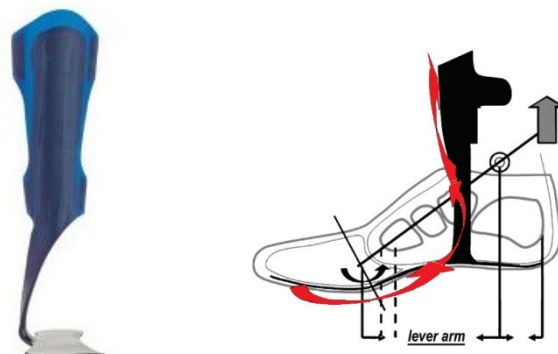

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーオフ フロー2 ½ トーオフ 2 ½ | トーオフ 2.0 トーオフ ショート | ブルーロッカー 2 ½ ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|

小児用

小さいお子様に対応できるデザインです。自然な歩行パターンの復元を目標とします。キディゲイト、キディロッカーをご利用の場合は、足底装具、SMO等を併用することを強くお勧めします。荷重時に足関節が中間位になるようコントロールすることが重要です。



| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●●○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●○ |
| A-Pの安定性 | ●●●●○ |
| 背屈アシスト | ●●●●○ |
| 痙性への対応 | ●●●●○ |
| 近位関節のサポート | ●●●●○ |

キディゲイトベビー

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:キディゲイト/キディゲイトベビー

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中程度の下垂足

■サイズ

Item no: 28900 / 左右 / サイズ

| Size | キディゲイト | | |
|------|------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| S | 160mm | 220mm | 8mm |
| M | 180mm | 257mm | 9mm |
| L | 200mm | 295mm | 9mm |
| XL | 210mm | 315mm | 9mm |

■ 消耗交換品

| | |
|----------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28378 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28368 / サイズ(本体サイズに従う) |

■サイズ

Item no: 28372 / 左右 / サイズ

| Size | キディゲイト ベビー | | |
|------|------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| S | 110mm | 150mm | 7mm |
| M | 125mm | 180mm | 7mm |
| L | 140mm | 200mm | 8mm |

■ 消耗交換品

| | |
|----------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28397 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28373 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | |
|-----------|-------|
| 前後への可動域 | ●○○○○ |
| M-Lの安定性 | ●●●●● |
| A-Pの安定性 | ●●●●● |
| 背屈アシスト | ●●●●● |
| 痙性への対応 | ●●●●● |
| 近位関節のサポート | ●●●●● |

ソフトキット

ストラップセット

カーボン製短下肢装具

品名:キディロッカー

■完成用部品認可済 <アラード TOF>

適応

- 中から高程度の下垂足、両側ユーザー

■サイズ

Item no: 28902 / 左右 / サイズ

| Size | キディロッカー | | |
|------|------------|-------|------|
| | フットプレートの長さ | 構造的高さ | 踵の差高 |
| S | 160mm | 220mm | 8mm |
| M | 180mm | 257mm | 9mm |
| L | 200mm | 295mm | 9mm |
| XL | 210mm | 315mm | 9mm |

■ 消耗交換品

| | |
|----------|--------------------------------|
| ソフトキット | Item no: 28378 / サイズ(本体サイズに従う) |
| ストラップセット | Item no: 28368 / サイズ(本体サイズに従う) |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| イブシロン フロー | トーフ フロー2 ½ トーフ 2 ½ | トーフ 2.0 トーフ ショート | ブルーロッカー 2 ½ ブルーロッカー 2.0 | ブルーロッカー ショート | キディゲイト キディロッカー | 施設評価用キット |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------|



キディゲイト / キディロッカー用アクセサリ 品名：ソフトシェル

キディゲイト、キディロッカー用ソフトシェル

- ソフトキットのパッド機能を兼ね備えた外装シェルカバー
- グレーとピンクの2柄

| | |
|-----|--------------------------------|
| グレー | Item no:28359 / サイズ(本体のサイズに従う) |
| ピンク | Item no:28358 / サイズ(本体のサイズに従う) |

キディゲイトベビー用ソフトシェル

- ソフトキットのパッド機能を兼ね備えた外装シェルカバー
- ブルーとピンクの2柄

| | |
|-----|--------------------------------|
| ブルー | Item no:28388 / サイズ(本体のサイズに従う) |
| ピンク | Item no:28389 / サイズ(本体のサイズに従う) |

アラードAFOシリーズ

品名：施設評価用キット

病院・医療施設様が施設内で装具選択の際やリハビリ用としてご利用いただくための試着評価用ユニットで、割安な価格設定になっております。ユーザー様へ納品できないように“NOT FOR RESALE”というラベルが貼り付けられています。各製品、全てのサイズのご用意があります。



利用例

- 歩行パターンに改善が見られるかの確認
- 他装具との比較
- 適切な種類、サイズを確認
- ユーザーが持続的に利用可能かどうかの確認
- リハビリ訓練用

カーボン製短下肢装具 アラードAFO

個別説明会開催中

内 容：●アラードAFOの特徴
●注意事項
●試着時のポイント

対 象：医療従事者向け
日 時：ご希望の時間に合わせて実施します。
時 間：約40分
形 式：ZOOMミーティング

申し込みは田沢製作所マーケティング部までご連絡ください。TEL.03-3812-6481