

# アルファライナー ラインナップ

	大腿用			大腿・下腿兼用
				
品名	アルファクラシック AKライナー	アルファハイブリッド AKライナー	アルファスマートテンプ AKライナー	アルファ デュオライナー
素材	サーモプラスチック クラシックゲル	サーモプラスチック ハイブリッドゲル	シリコーン	内側：サーモプラスチック 外側：シリコーン
カバー生地	スピリットファブリック (クッションライナー) マックスファブリック (ロッキングライナー)	セレクトファブリック	セレクトファブリック	なし
	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナーのみ
ページ	1	2	3	4

	下腿用					
						
品名	アルファクラシック スピリットライナー	アルファクラシック マックスライナー	アルファ ハイブリッドライ ナー	アルファ スマートテンプライ ナー	アルファ シリコーンライナー	アルファ 小児用ライナー
素材	サーモプラスチック クラシックゲル	サーモプラスチック クラシックゲル	サーモプラスチック ハイブリッドゲル	シリコーン	シリコーン	サーモプラスチック クラシックゲル
カバー生地	スピリットファブ リック	マックスファブリッ ク	セレクトファブリッ ク	セレクトファブリッ ク	セレクトファブリッ ク	マックスファブリッ ク
	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー	クッションライナー ロッキングライナー
ページ	5	5	6	7	8	9

	大腿用		
品名	アルファ クラシック AKライナー		
部品番号	ウィローウッド ALC-AKC-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド ALL-AKL-SIZE (ロッキングライナー)	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり
素材	サーモプラスチック (クラシックゲル)		



アルファ クラシックAKライナーはクッション性に優れたクラシックゲルを使用しており、傷がしやすい断端にも最適です。  
ゲルの形状は大変ユニークで、大腿骨骨端部を保護するために断端の外側に接するゲルが他の部位より厚くなっており、クッションライナーとロッキングライナーとは使用しているカバー生地が異なります。クッションライナーは柔軟性のあるスピリットファブリックを使用しており、カバー生地にベルクロを留めることができます。ロッキングライナーは摩擦や縦伸びに強いマックスファブリックを使用しております。


【特徴】

- 大腿切断者向けのユニークなゲル形状。
- ライナー素材はクッション性に優れたクラシックゲルを使用し、断端を優しく保護します。
- クッションライナーのカバー生地には柔軟性のあるスピリットファブリックを使用しております。
- ロッキングライナーのカバー生地には摩擦や縦伸びに強いマックスファブリックを使用しております。

【ゲルの形状】：アルファAKプロファイル



断端外側に接するゲルが他より厚くなっております。  
ライナーのロゴマークが必ず外側を向くように装着します。

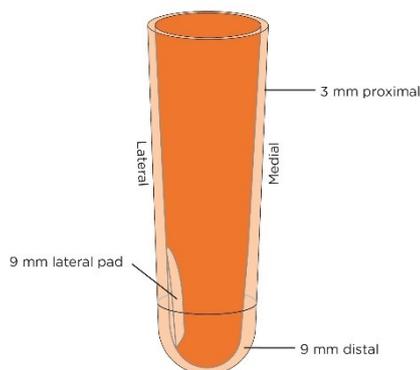

■アルファ クラシックAKライナーサイズ表

	M プラス	L	L プラス	XL
30cm近位の周径	34-54cm	37-64cm	44-80cm	48-90cm
4cm近位の周径	20-32cm	28-36cm	32-47cm	37-55cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	大腿用		
品名	アルファ ハイブリッド AKライナー		
部品番号	ウィローウッド H440-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド H442-SIZE (ロッキングライナー)	完成用部品	— —
素材	サーモプラスチック (ハイブリッドゲル)		



アルファ ハイブリッドAKライナーはクッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用しております（素材はサーモプラスチック）。ライナー装着時に感じる締め付け感が少なく、クッション性を有しながらも縦伸びに強いライナーです。

ライナーゲルの形状は、前後向きが無いシメトリカル形状で、装着向きに決まりはありません。カバー生地は、横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。ライナー内部に積層材を使用していないので、ライナー装着時の違和感が少ないライナーです。


【特徴】

- ライナー素材はクッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用。
- 横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を使用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
- ライナーの前後向きが無いシメトリカル形状。
- ロッキングライナーのアンプレラはアコーディオン式になっており、ライナー装着時の断端末部への違和感・締め付け感を抑えます。また圧を分散し、アンプレラ部の破損を防ぎます。

【ゲルの形状】：AKシメトリカル



断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはありません。

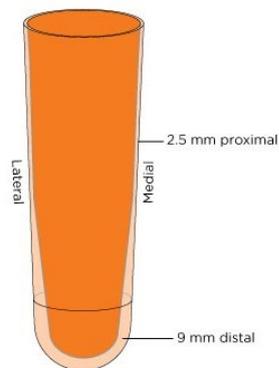

■ アルファ ハイブリッドAKライナーサイズ表

	M プラス	L	L プラス	XL
30cm近位の周径	34-54cm	37-64cm	44-80cm	48-90cm
4cm近位の周径	20-32cm	28-36cm	32-47cm	37-55cm


断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	大腿用		
品名	アルファ スマートテンプAKライナー		
部品番号	ウィローウッド T440-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド T442-SIZE (ロッキングライナー)	完成用部品	— —
素材	シリコーン		



アウトラストテクノロジーがどのように発汗を遅らせ、断端を快適に保つのか？

断端の温度が下がれば、ライナーに蓄えられた熱が断端へ戻ります。

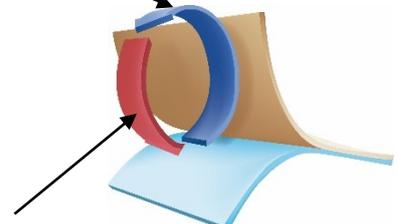

余分な断端の熱をライナー素材が吸収します。

アルファ スマートテンプAKライナーは断端の熱を吸収し、肌の温度を快適に保ちます。ライナーに採用されているアウトラスト®テクノロジーが断端の熱を吸収し発汗のタイミングを遅らせます。ライナーを外した後、ライナーに吸収された熱は放出されます。ライナー装着の発汗による不快感を覚える方、汗を拭き取るための義足ソケットの脱着の煩わしさを感じる方等に最適なライナーです。カバー生地は、横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。


【特徴】

- スマートテンプライナーは断端の余分な熱を吸収し、発汗を遅らせます。
- 肌の温度が下がればライナーに吸収されていた熱が断端へ戻り、断端表面の温度を終日一定に保ちます。
- スマートテンプライナーは断端の熱を吸収すると質感が柔らかくなり、クッション性を感じることができます。
- 横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
- ロッキングライナーのアンブレラはアコーディオン式になっており、ライナー装着時の断端末部への違和感・締め付け感を抑えます。また圧を分散し、アンブレラ部の破損を防ぎます。

【ゲルの形状】：AKシンメトリカル



断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはありません。

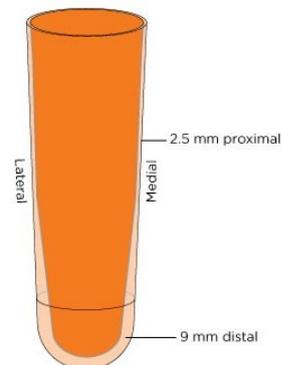

■ アルファ スマートテンプAKライナーサイズ表

	Mプラス1	Mプラス2	L1	L2	Lプラス	XL
30cm近位の周径	30-54cm	33-54cm	33-64cm	36-64cm	41-80cm	46-90cm
4cm近位の周径	20-24cm	24-29cm	28-32cm	32-36cm	32-39cm	37-45cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	大腿用・下腿兼用		
品名	アルファ デュオライナー		
部品番号	ウィローウッド D990-SIZE (クッションライナー)	完成用部品	—
素材	内側：サーモプラスチック (クラシックゲル) 外側：シリコーン		



付属のワンソックスはトリミングして使用します。



ライナーは内側がサーモプラスチック、  
外側がシリコーンの二層構造



アルファ デュオライナーはサーモプラスチックとシリコーンの異なる2種類の素材から成る二層構造のライナーです。肌に触れる内側は柔らかくクッション性に優れるサーモプラスチックゲルを使用し装着時の快適さを提供します。ライナー外側は耐久性のあるシリコーンを使用しております。ライナー表面はカバー生地を使用せず、スベスベしたサテン仕上げになっております。アルファ デュオライナーはクッションライナーのみで、下腿・大腿どちらにもご利用頂けます。アルファ デュオライナーを装着する際は、付属のワンゲルソックスを必ずデュオライナーの上に装着します。これによりライナーを保護すると共に吸着環境のための空気排出を容易にします。


【特徴】

- ライナー内側はクッション性に優れるサーモプラスチック、外側は耐久性に優れるシリコーンから成る二層構造。
- クッションライナーのみ。
- ライナー表面はスベスベしたサテン仕上げになっており、カバー生地を使用しておりません。
- 大腿・下腿兼用。
- ワンゲルソックスが付属します。

【ゲルの形状】：シンメトリカル



断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。  
ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはありません。

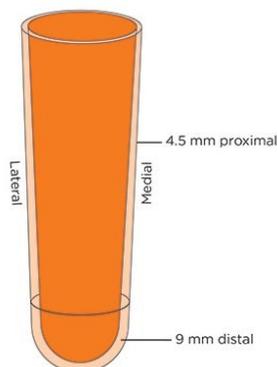

■アルファ デュオライナーサイズ表

	S	M	Mプラス	L	Lプラス	XL
30cm近位の周径	21-36cm	26-44cm	30-54cm	33-64cm	41-80cm	46-90cm
4cm近位の周径	15-25cm	20-29cm	20-29cm	28-36cm	32-39cm	37-45cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

下腿用			
品名	アルファ クラシック スピリットライナー / アルファ クラシック マックスライナー		
部品番号	ウィローウッド ALC-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド ALL-SIZE (ロックングライナー)	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり
素材	サーモプラスチック (クラシックゲル)		




アルファ クラシックライナーはスキんフレンドリーなサーモプラスチック製ライナーです。ライナーを装着している間に、ゲルの形状が変化し、ライナーが断端になじんできます。アルファ クラシックライナーは使用しているカバー生地により製品名が異なります（柔軟性のある柔らかいカバー生地のスピリットライナーと縦伸びや摩擦に強いカバー生地のマックスライナー）。

**【特徴】**

- クッション性に優れたクラシックゲルを使用し、断端を優しく保護します。
- サーモプラスチックの特性により、熱を加えることによりライナーの形状が変化します。
- ライナーの背面は、膝の曲げ伸ばしが行い易いように、断端末より約7cmを過ぎた位置から薄くなっております。

**【ゲルの形状】**：アルファクラシックライナーには3種類のゲル形状と3種類の厚み(3,6,9mm)が存在しますが、日本国内では6mm厚、ユニフォーム形状を標準在庫としております。その他は取寄せです。

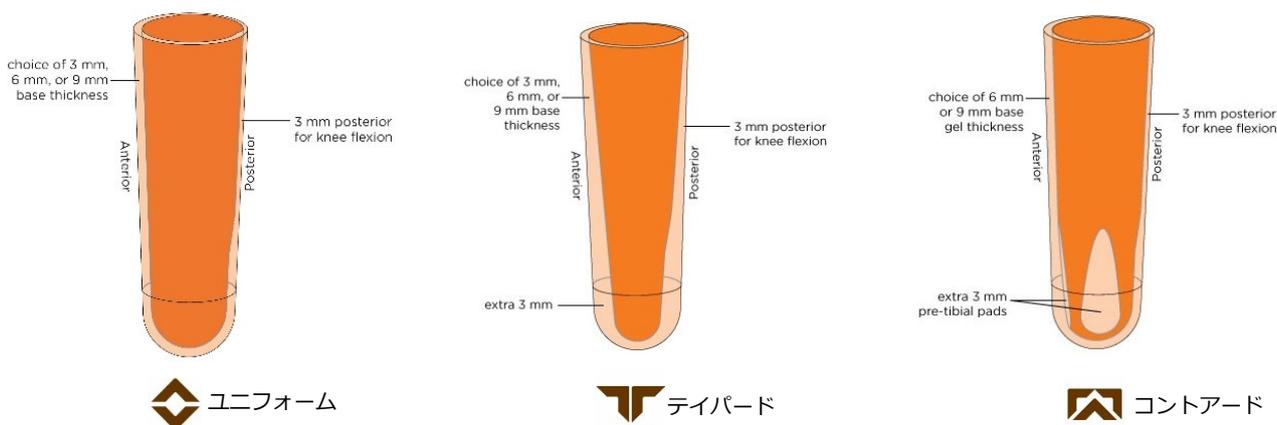


**■アルファ クラシックライナー サイズ表**

	S	M	Mプラス	L	Lプラス	XL
30cm近位の周径	20-27cm	23-36cm	33-50cm	36-55cm	40-60cm	43-65cm
4cm近位の周径	15-22cm	18-26cm	20-28cm	25-33cm	28-40cm	33-45cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	下腿用		
品名	アルファ ハイブリッドライナー		
部品番号	ウィローウッド H350-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド H352-SIZE (ロックングライナー)	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり
素材	サーモプラスチック (ハイブリッドゲル)		

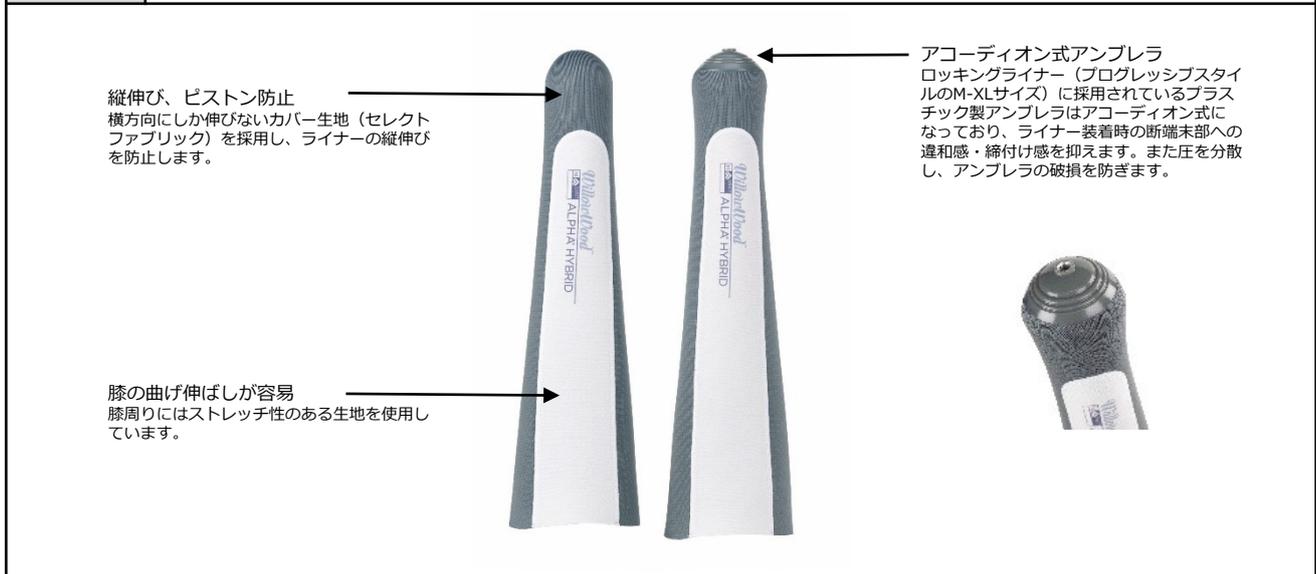

アルファ ハイブリッドライナーはクッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用しております (素材はサーモプラスチック)。ライナー装着時に感じる締め付け感が少なく、クッション性を有しながらも縦伸びに強いゲルライナーをお求めの方に最適のライナーです。

【特徴】

- クッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用しております。
- 横方向にしか伸びない特殊生地 (セレクトファブリック) を使用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
- 膝周りはストレッチ性のある生地を使用し、膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。

【ゲルの形状】 : ハイブリッドライナーにはユニフォームとプログレッシブの2種類の形状があり、日本国内ではクッションライナーはユニフォームをロックングライナーはプログレッシブを標準在庫としております。厚みの種類はありません。



■アルファ ハイブリッドライナー **ユニフォーム** サイズ表

	S	M	Mプラス	L	Lプラス	XL
30cm近位の周径	20-27cm	23-36cm	33-50cm	36-55cm	40-60cm	43-65cm
4cm近位の周径	15-22cm	18-26cm	20-28cm	25-33cm	28-40cm	33-45cm

■アルファ ハイブリッドライナー **プログレッシブ** サイズ表

	S	M	Mプラス	L	Lプラス	XL
30cm近位の周径	19-30cm	26-46cm	30-54cm	33-64cm	41-80cm	46-90cm
4cm近位の周径	14-22cm	20-32cm	20-32cm	28-36cm	32-47cm	37-55cm


断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	下腿用		
品名	アルファ スマートテンブライナー		
部品番号	ウィローウッド T350-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド T352-SIZE (ロッキングライナー)	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり
素材	シリコーン		



アウトラストテクノロジーがどのように発汗を遅らせ、断端を快適に保つのか？

断端の温度が下がれば、ライナーに蓄えられた熱が断端へ戻ります。

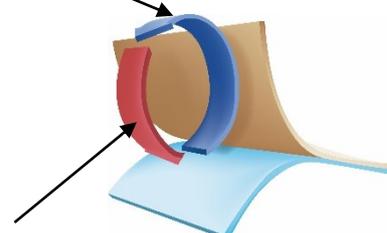


余分な断端の熱をライナー素材が吸収します。

アルファ スマートテンブライナーは断端の熱を吸収し、肌の温度を快適に保ちます。ライナーに採用されているアウトラスト®テクノロジーが断端の熱を吸収し発汗のタイミングを遅らせます。ライナー装着時の発汗による不快感を覚える方、汗を拭き取るために義足ソケットの脱着の煩わしさを感じる方等に最適なライナーです。


【特徴】

- スマートテンブライナーは断端の余分な熱を吸収し、発汗を遅らせます。
- 断端の温度が下がればライナーに吸収されていた熱が断端へ戻り、断端表面の温度を終日一定に保ちます。
- スマートテンブライナーは断端の熱を吸収すると質感が柔らかくなり、クッション性を感じることができます。

【ゲルの形状】：スマートテンブライナーにはユニフォームとプログレッシブの2種類の形状があり、日本国内ではクッションライナーはユニフォームをロッキングライナーはプログレッシブを標準在庫としております。厚みの種類はありません。

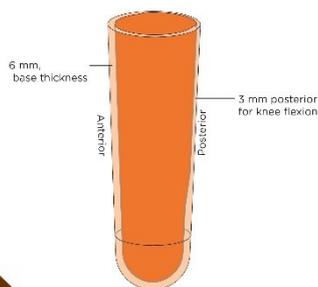

ユニフォーム

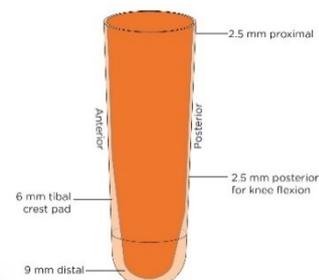

プログレッシブ

■アルファ スマートテンブライナー ユニフォーム サイズ表

	S	M	Mプラス	L	Lプラス	XL
30cm近位の周径	21-31cm	23-36cm	33-50cm	36-55cm	40-60cm	43-65cm
4cm近位の周径	15-22cm	18-26cm	20-28cm	25-33cm	28-40cm	33-45cm

■アルファ スマートテンブライナー プログレッシブ サイズ表

	S1	S2	M1	M2	Mプラス 1	Mプラス 2	L1	L2	Lプラス	XL
30cm近位の周径	19-32	21-32	26-44	29-44	30-54	33-54	33-64	36-64	41-80	46-90
4cm近位の周径	14-22	16-23	20-24	24-29	20-24	24-29	28-32	32-36	32-39	37-45

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	下腿用		
品名	アルファ シリコンライナー		
部品番号	ウィローウッド S350-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド S352-SIZE (ロッキングライナー)	完成用部品	— —
素材	シリコン		



アルファ シリコンライナーはビタミンEとスキンケア成分が配合されたメディカルグレードのシリコン素材を使用しております。肌に接する面はべたべた感や粘つき感の少ない仕上がりになっております。カバー生地は、横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を使用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。膝周りはストレッチ性のある生地を使用し、膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。


【特徴】

- メディカルグレードのシリコンを使用。
- 断端に接するシリコン面は、べたべた感や粘つき感が少ない特殊コーティング仕上げになっております。
- ライナー内側に積層材を使用しておらず、カバー生地全体で縦伸びを防止するのでライナー装着時の断端末部への違和感が少ない。

【ゲルの形状】：プログレッシブ



断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。ライナーには前後があり、ライナー背面が薄くなっています。

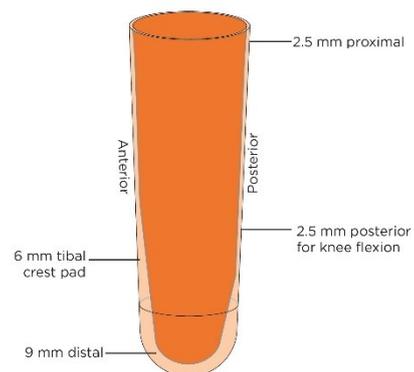

■アルファ シリコンライナー プログレッシブ サイズ表

	S1	S2	M1	M2	Mプラス 1	Mプラス 2	L1	L2	Lプラス	XL
30cm近位の周径	19-32	21-32	26-44	29-44	30-54	33-54	33-64	36-64	41-80	46-90
4cm近位の周径	14-22	16-23	20-24	24-29	20-24	24-29	28-32	32-36	32-39	37-45

断端末部から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

	下腿用		
品名	アルファ 小児用ライナー		
部品番号	ウィローウッド ALC-SIZE (クッションライナー) ウィローウッド ALL-SIZE (ロックングライナー)	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり
素材	サーモプラスチック (クラシックゲル)		



アルファ 小児用ライナーはクッション性に優れたクラシックゲルを使用しております。カバー生地には摩擦や縦伸びに強いマックスファブリックを採用しております。ロックングライナーのピンアタッチメント規格は1/4" X 20。

【特徴】


- 小児用。
- ゲルの厚みは 3 mm。
- クッション性に優れたクラシックゲルを使用し、断端を優しく保護します。
- 縦伸びや摩擦に強いカバー生地を使用しております。

【ゲルの形状】：ユニフォーム



ライナー全体的にゲルの厚みが均一です。  
ゲルの厚みは全体的に3mmです。

Uniform Liner Profile, 3 mm

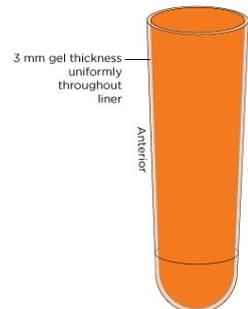


■ アルファ 小児用ライナー サイズ表

	XS	XS プラス
30cm近位の周径	15-22cm	20-33cm
4cm近位の周径	10-16cm	10-16cm

断端末から4cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

品名	アルファ ゲルカップ		
部品番号	ウィローウッド ALA-C	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし/パッド
素材	サーモプラスチック (クラシックゲル)		
サイズ	S, M, L, XL		

アルファライナー用ディスタルカップ

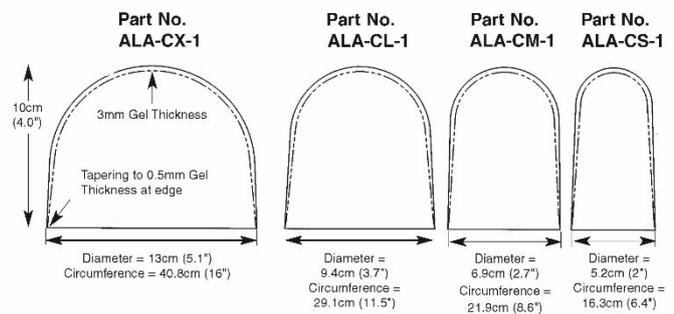

品名	アルファ ボリュームマネージメントパッド		
部品番号	ウィローウッド ALA-VM	完成用部品	その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし/パッド
素材	サーモプラスチック (クラシックゲル)		
サイズ	1袋3枚入り (S, M, Lサイズのパッドが各1枚)		

断端容量の減少時に使用するパッドです。

