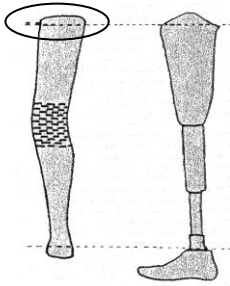
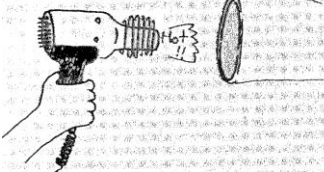
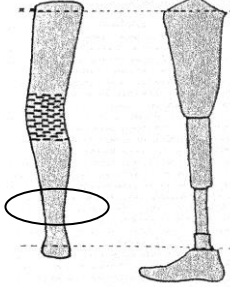
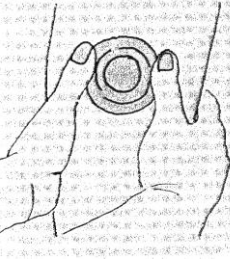


Teh Lin AK用フォームカバー <TFC-DF> 取付け加工方法手順

| | |
|---|--|
|  | <p>1. フォームカバーの膝中心と義足の膝軸とを合わせ、坐骨レベルをマークし、カットします。</p> |
|  | <p>2. フォームカバー上縁内側にシリコンスプレーもしくはタルクを塗ります。 フォームカバーの上縁部をヒートガンであたため、義足に被せます(中ぐりする必要はありません)。フォームカバーを被せるときは、膝の中心を十分注意して下さい。</p> <p><u>加工のポイント:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● フォームが縮みますので、オープンには入れないで下さい。 |
|  | <p>3. 足底部にてフォームカバーの長さを調節して下さい。また、健肢に合わせ必要な部分を削って下さい。</p> <p><u>加工のポイント:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 膝部分に少し余裕を持たせると膝の曲げ伸ばし時に膝継手への影響が少なくなります。 ● 膝の曲がりやが硬いと感じる場合は、フォーム内側の補強テープに切れ込みを入れます。 <p><u>足首形状の出し方:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 健足に合わせフォームカバーをカットすると足首形状の修正が必要となる場合があります。その場合は、プラスターゾート等で足首形状を作製しフォームカバーに接着し形状を整える必要があります。 |
|  | <p>4. バルブ部分を円形に切り取り、ゴムキャップ(TRC-O)を接着します。ゴムキャップの接着面は粗らして接着して下さい。フォームカバー上縁部にゴムバンド(TRB-OA)をはめます。</p> <p><u>加工のポイント:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 足部とフォームは接着せずしておくことをお勧めします(接着すると膝の曲げ伸ばしへ多少影響がでます)。接着する場合は、予め膝周りに余裕のある全長として下さい。 |