

CROSS™

反張膝用装具

品名：クロス

過伸展防止ストラップとROM調節可能な支柱で膝過伸展を防止します。装着が簡単に行えるよう、構造、素材、アクセサリに様々な工夫がされています。

- 支柱付き。
- 手の不自由な方でも装着が簡単です。
- アラードAFOと併用する事ができます。

禁忌

- スポーツでの使用
- 大腿四頭筋機能不全
- 15°以上の膝過伸展



アラードAFOと併用時



■サイズ表

Item no.	Size	膝蓋骨中心から15cm遠位の周径	膝蓋骨中心の周径	膝蓋骨中心から15cm近位周径
28715 0011	S	32 - 37cm	32 - 37cm	39 - 44cm
28715 0012	M	36 - 41cm	36 - 41cm	43 - 48cm
28715 0013	L	40 - 45cm	40 - 45cm	47 - 52cm
28715 0014	XL	44 - 49cm	44 - 49cm	51 - 57cm




内側にズレ下がり防止シリコン付

膝蓋骨周囲に立体的なシリコン素材を使用し、ズレ落ちを防止

ROM調整チップで可動域調節が可能
 屈曲：45°、60°、75°、90°
 伸展：10°、20°、30°、40°

顆部に沿い易い内外側のシェル

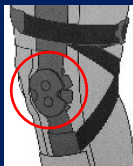

過伸展防止ストラップが片手で調節可能

簡単装着

装着が容易に行えるよう、構造、素材、アクセサリーに様々な工夫をしております。



QRコードにスマホをかざすと装着方法の動画をご覧いただけます。

つかみやすい構造

- ◆ 装具近位部にはフレームが内蔵されており、筒状に保たれるので足を入れやすく装着が容易です。
- ◆ ユーザーが装具を引き上げ易いように、把持しやすい構造です。



片手で簡単に装着可能



- ◆ 付属される装着補助ツールを使用し、以下のようなケースでも簡単に装具を装着することができます。
- ・ 座位でのバランスが悪く一人で装具を装着するのが困難なケース
- ・ 片麻痺や手に機能障害があるケース

低摩擦インナー生地を採用



- ◆ 装具内側に配置されたスムーズなインナー生地が皮膚と装具との摩擦を減少させ、皮膚への刺激を抑えます。
- ◆ 摩擦なくスムーズに装具を装着することができます。



株式会社 田沢製作所 マーケティング部直通ダイヤル

〒113-0033 東京都文京区本郷1-35-28 メゾンドール本郷2F

TEL. 03-3812-6481 FAX. 03-5804-8595 <http://www.tazawa.co.jp>