

製品名: スキナジー

スキナジーは、大変リアルな下腿用コスメチックカバーです。
スキナジーを取り付けることによる外観の改善で、
義足ユーザーのQOLの向上、社会復帰に寄与します。



※写真はイメージです



製品名：スキナジー

完成用部品認可済：リアルソックス / RSL スティーパー SKY-SIZE

- スカートををはきたいという女性へ！
- 水周りの仕事でフォームカバーを濡らしたくない方へ！*
- ストッキングを履きたくないという男性へ！



写真は指又ありタイプ。
指又なしタイプもございます。

Tufsil2 というシリコン製で、モールドィング一体成型製造法により、継ぎ目の無い大変リアルな仕上がりになっております。

足部の種類（指又の有無、左右）や色等に対応可能な既製品のコスメチックカバーで、組上げ後の義足に簡単に取り付けすることができます。またシリコン内側に補強材が配置されており、耐久性にも優れます。スキナジーを取り付けすることによる外観の改善で、義足ユーザーのQOLの向上、社会復帰に寄与します。

*注意：本製品は完全防水ではありません。

スキナジーには19種類の色がございます（日本では色番号E2番を標準在庫としております）。



株式会社 田沢製作所 マーケティング部直通ダイヤル

<http://www.tazawa.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-35-28 ゾンター本郷 2F TEL.03-3812-6481 FAX.03-5804-8595 E-mail. tazawa@tazawa.co.jp

In our professional service, we take pride.

サイズ選択方法（以下の情報が必要です）

1. 足部指又の有無 2. 足部サイズ 3. 左右 4. ふくらはぎの太さ（SかL）



<サイズ表>

例) 指又有り、足部サイズ24cm、左、ふくらはぎの周径34cmであれば→ 注文番号：指又有24 LS

注文番号	足部サイズ	左右	ふくらはぎの適応範囲 周径によりSとLサイズがあります
指又の有無 22 LS	22 - 23cm	左	28cm ~ 35cm
指又の有無 22 RS		右	
指又の有無 22 LL		左	32cm ~ 40cm
指又の有無 22 RL		右	
指又の有無 24 LS	24 - 25cm	左	31cm ~ 39cm
指又の有無 24 RS		右	
指又の有無 24 LL		左	35cm ~ 44cm
指又の有無 24 RL		右	
指又の有無 26 LS	26 - 27cm	左	32cm ~ 40cm
指又の有無 26 RS		右	
指又の有無 26 LL		左	37cm ~ 46cm
指又の有無 26 RL		右	
指又の有無 28 LS	28 - 30cm	左	34cm ~ 42.5cm
指又の有無 28 RS		右	
指又の有無 28 LL		左	39cm ~ 49cm
指又の有無 28 RL		右	

取り付け方法

- スキナジーはプラストブーツ等の硬いインナーフォームの上に装着して下さい。インナーフォームに装着時のテンションによって保持されますので、柔らかいフォームへの装着はおすすめできません。
- インナーフォームと足部カバーとの接続部では、スキナジーに大きなストレスが集中します。そのような箇所では破損の可能性が高くなりますので、足部カバー上縁のエッジを丸く処理したり、皮革を貼る等してストレスの集中を防いで下さい(右図)。
- スキナジーを装着する際は、少量のタルクパウダーもしくはヘアリンスを塗布してから全体を裏返し義足に装着させます。ヒートガンをあてる必要はありません。
- スキナジーのトリミング処理については、ソケットの上縁より2~3cm 長めにカットします。ソケット上縁の形状に合わせカットするときれいな仕上がりになります。
- 必要であれば接着剤で接着して下さい。義足調節等でスキナジーの取り外しがある場合は、塗布貼り合せ用ボンド(ボンデンG等)がおすすめです。スキナジー上縁を約2.5cm ロールダウンし、中目程度の粗さのサンドペーパーでソケットを研磨して下さい。研磨したソケット箇所(裏側)に接するスキナジー(裏側)も細目程度の粗さのサンドペーパーで研磨します。塗布貼り合せ用ボンド(ボンデンG等)をサンドペーパーで研磨した箇所(ソケットとスキナジー)に塗布し、スキナジーをソケットへ接着します。

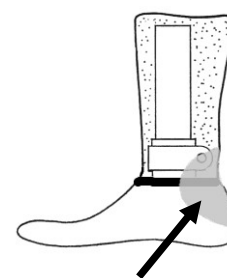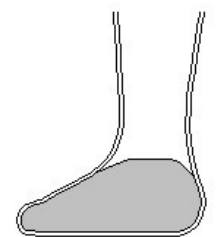

皮革